


TEOSYAL® RHA 1



2797
Syringe

0197
Needles

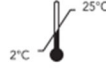

Only for syringe



TEOXANE SA
Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 GENEVE
Tél. +41 (22) 344 96 36 - Fax +41 (22) 340 29 33
info@teoxane.com

AÇIKLAMA

TEOSYAL RHA® 1 hayvan kaynaklı olmayan, hem çapraz bağlı hem de çapraz bağlı olmayan hiyalüronik asidin steril, şeffaf, pirojenik olmayan, viskoelastik jelidir ve anestetik özellikleri için kütle göre %0.3 lidokain hidroklorür içerir. Her bir kutu bir veya iki adet önceden doldurulmuş TEOSYAL RHA® 1 şırıngası içermektedir. Her bir şırınga için, kutuda iki adet steril 30G1/2" iğne ve iki adet izlenebilirlik etiketi (bir tanesi hastaya verilecek, bir tanesi de hastanın tıbbi kaydında doktor tarafından muhafaza edilecektir) bulunmaktadır. Her şırınganın hacmi şırıngaların üzerinde ve karton kutusunun üzerinde belirtilmiştir.

BİLEŞİM

Hiyalüronik asit.....15 mg/mL
Lidokain hidroklorür.....kütle göre %0.3
Fosfat tamponu pH 7.3..... 1 mL'ye yetecek miktarda

ENDİKASYONLAR

TEOSYAL® ürünlerinin terapötik endikasyonları: HIV tedavisi gören hastalarda rekonstrüktif cerrahi: yara izlerinin sebep olduğu çökmelerin doldurulması, lipoatrofi ile kaybedilen hacimlerin yeniden oluşturulması.

TEOSYAL® ürünlerinin estetik endikasyonları: Yaşlanmış derinin anatomisini değiştirmek: hacimlerin yeniden oluşturulması, deri çökmelerinin doldurulması, deriye neminin geri kazandırılması.

TEOSYAL RHA® 1 yüzde, boyunda ve boyun çizgisinde yaşlanma etkilerinin görüldüğü yıpranmış veya canlılığını yitirmiş ciltte düzeltme için ve ayrıca yüzeysel kırışıklıkların (ağız çevresi kırışıklıkları, üst dudak kenarı ve filtrum gibi), ciltteki çatlakların ve çizgilerin eşit şekilde doldurulmasında endikedir. Ayrıca cilt kıvrımlarının doldurulmasında da endikedir (gözaltı halkaları dahil).

Lidokain hidroklorür ağrı hissini azaltmak için tasarlanmış bir lokal anestetik ajandır.

ETKİ ŞEKLİ

Hiyalüronik asit dermal ekstrasellüler matriksin esas maddenin önemli bir bileşenidir. Sahici bir moleküler süngerdir ve sarmal yapısı sayesinde ağırlığının bin katı kadar su tutabilir. Deri dokularında bolca bulunur ve cildi nemlendirir, ancak yaşlanma ile birlikte içeriği azalır. Cilt incelidikçe ve kırılan hale geldikçe, ilk cilt kırığı çizgileri ortaya çıkar.

Yaşlanma etkilerinin görüldüğü yıpranmış veya canlılığını yitirmiş cildi etkileyen ince çizgilerin/kırışıklıkların düzeltilmesi için (infraorbital alan hariç), TEOSYAL RHA® 1 orta dermise enjekte edilir. TEOSYAL RHA® 1 ince yüzeysel kırışıklıkları, ciltteki çatlakları ve çizgileri eşit şekilde doldurur ve yıpranmış veya canlılığını yitirmiş ciltte düzeltme sağlar. Yumuşaklığı ve

DOZAJ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

TEOSYAL RHA® 1 geçerli duruma göre yetkili hekimler veya sağlık çalışanları tarafından yerel yönetmeliklere göre enjekte edilmek üzere tasarlanmıştır. Potansiyel komplikasyon riskini en aza indirmek için bu ürün yalnızca enjeksiyon tekniklerinde iyi eğitilmiş ve deneyimli ve enjeksiyon kullanı ve çevresindeki anatomi ve fizyoloji konusunda bilgi sahibi uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

Tedaviden önce, hastalara geçmiş tıbbi öyküleri konusunda sorular sorulmalı ve hastalar endikasyonlar, beklenen sonuçlar, kontrendikasyonlar, önlemler ve potansiyel yan etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. Hastaların lokal veya bölgesel anestezi ajanıyla ağrı kesici ihtiyacı değerlendirilmelidir. Tedavi bölgeleri uygun bir antiseptik çözelti ile dezenfekte edilmelidir. Enjeksiyonun kutuda verilen iğneler kullanılarak yapılması kesinlikle tavsiye edilir.

Yaşlanma etkilerinin görüldüğü yıpranmış veya canlılığını yitirmiş cildi etkileyen ince çizgilerin/kırışıklıkların düzeltilmesi için (infraorbital alan hariç), TEOSYAL RHA® 1 de orta dermise yavaşça enjekte edilmek üzere tasarlanmıştır.

infraorbital bölgede (göz halkalarının / göz pınarının altında), TEOSYAL RHA® 1 periosteum ile temas edecek şekilde yalnızca kas ve yağ tabakalarının altına yavaşça enjekte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Enjeksiyon boyunca göz altı halkası bölgelerinin hafifçe düzeltilmesi özellikle önemlidir. Göz pınarı başına en fazla 0.5 mL enjeksiyon. Infraorbital alan dışındaki diğer alanlara enjeksiyon için, seans başına en fazla 3 mL enjeksiyon. Tedaviden sorumlu sağlık çalışanı tedavi uygulanan alana ve ürünün uygulanan miktarına göre enjeksiyon tekniği konusunda karar verecektir.

Enjeksiyon sırasında iğnenin rengi cildin altından görünür haldeyse, bu durum enjeksiyonun çok yüzeysel olabileceğini düşündürür ve bu da düzeltme düzensizliklerine neden olabilir.

Tedavi uygulanacak kusurun türü ve şiddeti, enjeksiyon derinliği ve enjeksiyon tekniği göz önünde bulundurularak düzeltme derecesi ve süresi belirlenir. Enjeksiyon hacmi ve seans sayısı tedavi uygulanacak alana ve gereken düzeltmeye bağlıdır.

Ürünün düzeltme yapılan bölgelerde eşit şekilde dağılmasını sağlamak için uygulama bölgelerine dikkatli bir şekilde masaj uygulanmalıdır.

YAN ETKİLER

Doktor, enjeksiyondan hemen sonra veya gecikmeli olarak ortaya çıkabilecek, tedaviyle ilgili olası yan etkiler konusunda hastayı bilgilendirmelidir. Aşağıdakiler bunlara dahil olmakla birlikte bu liste tam değildir:

- **Yaygın belirtiler:** enjeksiyon noktasında ağrı, hassaslık, kızarıklık/eritem, morarma/hematom, şişme/ödem, sertlik/ endürasyon, topaklanma/kabarıklık, kaşıntı, diskromi (Tyndall etkisi / renk değişikliği dahil).

spesifik viskoelastik özellikleri sayesinde TEOSYAL RHA® 1 cilt dokusunda eşit şekilde dağıtılır. Bu özellik dermiste optimum bir dermal hidrasyon düzeyinin korunmasını ve cilt esnekliğinde uzun süreli bir düzeltme sağlar. TEOSYAL RHA® 1 zamanla progresif olarak rezorbe edilen biyoçözünür bir implanttır. TEOSYAL RHA® 1 ürününde bulunan değiştirilmemiş hiyalüronik asit implantın rezorbe edilmesi sırasında cilt dokularına yayılır.

infraorbital bölgede (göz halkalarının / göz pınarının altında), TEOSYAL RHA® 1 periosteum ile temas edecek şekilde kas ve yağ tabakalarının altına enjekte edilir.

Yapılacak düzeltmelere ve istenilen sonuçlara bağlı şekilde, en uygun sonucun elde edilmesi için bir veya daha fazla tedavi seansı / rötüş gerekli olabilir. Bu, tedaviden sorumlu sağlık çalışanı tarafından belirlenmelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

TEOSYAL RHA® 1 aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- cildin en yüzeysel katmanında (epidermis) enjeksiyonlar için,
 - "Etki şekli" bölümünde tanımlananlar dışındaki enjeksiyon derinlikleri için, - hastaların göz altı torbaları (yağlı orbital herniasyon veya lenfatik stazis) veya alt göz kapağı hiperlaksitesi ya da infraorbital bölgeye (göz halkasının altına, göz pınarı) enjekte edildiğinde cerrahi için endike olan herhangi bir koşul yaşaması durumunda.
 - infraorbital bölgeye (göz halkasının altına, göz pınarı) enjekte edildiğinde kasın üstündeki katmanlarda enjeksiyonlar için.
 - hastanın tedavi bölgesinde ya da yakınında deri hastalığı, inflamasyonu ya da enfeksiyonu olması durumunda. Enjeksiyon prosedürleri latent veya sublinik herpes viral enfeksiyonlarının reaktivasyonuna neden olabilir,
 - hiyalüronik aside karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda, ciddi alerjik reaksiyonlar ve anafilaktik şok dahil,
 - **lidokain ve/veya amid grubu lokal anestetiklere karşı bilinen aşırı duyarlılık varsa,**
 - soyma, lazer tedavisi veya ultrason temelli tedavi ile birlikte
 - otoimmün hastalıkları olan hastalarda,
 - kalp hastalıkları olan ve/veya kalp hastalığı için tedavi gören (beta blokerler) hastalarda
 - hepatosellüler yetmezliği olan ve/veya bir karaciğer hastalığı tedavisi gören hastalarda,
 - epilepsi veya porfiriya yaşayan hastalarda,
 - hamilelikte, emziren kadınlarda veya çocuklarda,
- Araştırılmamış olan diğer dolgu implantlarıyla olası etkileşimler nedeniyle, diğer dolgu implantlarının bulunabileceği bölgelere veya bu bölgelerin çevresine TEOSYAL RHA® 1 enjeksiyonu önerilmez. Hiyalüronik asit (olasılıkla kalıcı) dışında bir implant uygulanan bir alana bu ürünü enjekte etmeyin.

Kan damarlarına enjekte etmeyin.

Göz kapaklarına enjekte etmeyin.

- **Daha az yaygın belirtiler:** intlamatuvar reaksiyonlar, enfeksiyon (lokalize veya genel enfeksiyon be abse dahil), enjeksiyon uygulanan alan çevresinde hassaslık kaybı veya geçici parestezi, alerji riski (aşırı duyarlılık, dermatit alerjisi, ürtiker dahil), nodüller (olasılıkla granülomalar), implant migrasyonu.

- **Nadir ancak ciddi advers olaylar meydana gelebilir:**

* Enjeksiyon emoblizasyonu, damarlarda tıkanmaya, iskemiyeye, cilt/doku nekrozuna, geçici veya kalıcı görme kaybına (körlük dahil), inmeye yol açan serebral iskemiyeye/hemorajiye, enfarktüse neden olabilir.

* Anjiyoödem ve anafilaktik şoka ilerleyebilen hızlı aşırı duyarlılık.

Tedaviden önce hekim hastaya, yukarıda tanımlanan ya da tanımlanmayan veya bir haftadan uzun süren herhangi bir advers olayı bildirmesi talimatını vermektedir.

Böyle bir durumda doktor mümkün olan en kısa sürede ürünün dağıtıcısına ve/veya üreticisine (medical@teoxane.com) konu ile ilgili bilgi verecektir. Doktor uygun bir tedaviyi kullanmalı veya reçete etmelidir.

Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay medical@teoxane.com adresine ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu ülkedeki ulusal sağlık makamına bildirilmelidir.

İĞNENİN ŞIRINGAYA TAKILMASI

TEOSYAL RHA® ürünlerinin en uygun kullanımı için, iğnenin şırıngaya doğru şekilde takılması önemlidir (şekil 1 ile 5'te tanımlanan aşağıdaki adımlara bakınız). Enjeksiyon sırasında tıkanma veya basınç hissettiğiniz takdirde enjeksiyonu durdurunuz ve iğneyi değiştiriniz.

KULLANIM ÖNLEMLERİ

Yumuşak doku dolgu enjeksiyonu, bu tipteki diğer tüm prosedürler gibi enfeksiyon riski taşıyan bir tıbbi prosedürdür. Uygun bir ortamda gerçekleştirilmeli ve tüm gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlara ek olarak hekimin yüz anatomisi konusunda donanımlı olması gereklidir.

Uygulama öncesinde, doktor, dolgu ürününün lidokain içerdiğini göz önünde bulundurmalıdır. Ürün etiketindeki son kullanma tarihini ve kullanmadan önce iç ambalajı kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş veya ambalaj yırtılmış ise kullanmayın. Şırınga içeriğinde ayrışma belirtileri, kabarcıklar ve/veya bulanıklık görülürse bu şırıngayı kullanmayın. Hastaya şu öneriler sunulmalıdır:

- enjeksiyon seansından önceki haftada yüksek dozlarda E vitamini, aspirin, anti-inflamatuvar veya anti-koagülan ilaçlar almamak.

- enjeksiyondan sonraki 12 saat içinde herhangi bir makyaj ürünü kullanmamak. - tedaviden sonraki iki haftalık sürede diş tedavilerinden, herhangi bir türde diğer estetik prosedürden,

uzun süre güneşe maruziyetten, UV ışınlarından ve uç sıcaklık değerlerinden (çok soğuk, sauna, hamam, vb.) kaçınmak.

Etkileşim riski nedeniyle, TEOSYAL® dolgu maddelerinin kuaterner amonyum tuzlarıyla (benzalkonyum klorür gibi) temas etmemesi önerilir.

Enjeksiyon sırasında herhangi bir zamanda beyazlaşma meydana gelirse enjeksiyon durdurulmalı ve cilt normal rengine dönene kadar gereken tüm adımlar atılmalıdır.

Bir kan damarına veya sinire yakın bölgeye enjeksiyon yapmamak için dikkatli olun. Bir sinire hasar vermemek için dikkat edin.

Çok yüzeysel enjeksiyonlar Tyndall etkisi olarak bilinen istenmeyen maviye benzer ışık yansıtmasına neden olabilir.

Aşırı düzeltme uygulamayın.






Tedavi seansının sonunda, kalan tüm kullanılmayan ürünün atılması büyük önem taşır. Tekrar kullanmayın. Bu cihaz sadece tek bir kez kullanıma uygundur. Yeniden kullanım halinde sterilitik garanti edilmemektedir. Tekrar sterilize etmeyin. Etkililik azalacak şekilde jel kalitesi düşebilir ve bir iğne üzerinden ekstrüzyonu engellenecek şekilde jel kuruyabilir. Kullanılmış iğneleri uygun kaplara atın.

Bu ürün ilaç testlerinde müspet sonuç verebilecek bir aktif bileşen içerdiğinden, sporcuların bu durumdan haberdar edilmesi gereklidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 2°C ile 25°C arasında muhafaza edin.

Kullanımdan önce, pakette görünür hasar belirtileri olmadığından emin olun

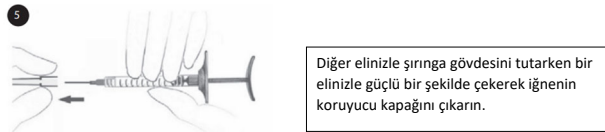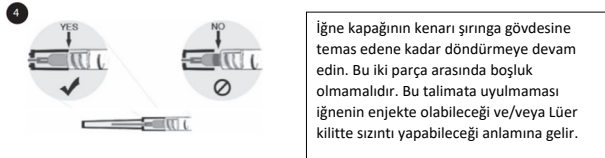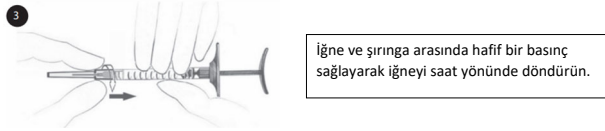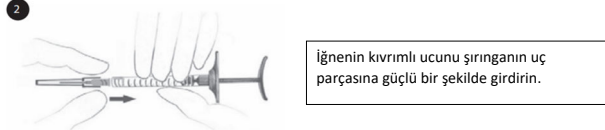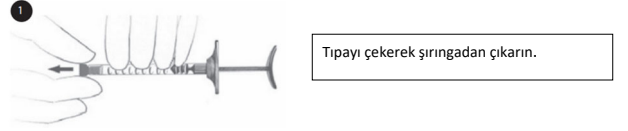

TEOSYAL RHA 1
Ref. 230292/00
NOIR
PANTONE 184C
17/07/2020